

## FLAKON ADAPTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU



### İLGİLİ ÜRÜNLER

Spike uç, iğnesiz konnektör ve hidrofobik filtre içeren flakon adaptörleri

### ÜRÜN TANIMI

ONCOERA VIAL Flakon Adaptörleri, kullanıcıları aerosollerden ve ilacı mikrobiyolojik kontaminasyondan korumak için, hidrofobik 0.2 µm hava giriş filtresi ile donatılmıştır. Enjektör adaptörleri ile birlikte kullanıldığında kapalı bir sistem oluşturur.

### KULLANMA TALİMATI

1. Flakonun koruyucu kapağı açılır. Ortaya çıkan mantar tıpa %70 IPA ile silinir.
2. Flakon adaptörünün ambalajı açılır. Spike uç koruyucu kapağı çıkarılır. Flakon adaptörünün spike ucu flakonun mantar tıpasına tek hamlede ve dik bir açı ile batırılır.
3. Enjektör adaptörünün ve luer kilitli şırınganın ambalajları açılır. Enjektör adaptörü luer kilitli şırıngaya çevirerek kilitlenir.
4. Enjektör adaptörü, flakon adaptörünün iğnesiz konnektörüne çevirerek kilitlenir.
5. Şırınga yere 90 derecelik bir açıyla tutularak şırınga pistonu geri doğru çekilir ve gerekli miktar ilaç şırıngaya alınır.
6. Transfer setin üzerinde bulunan iğnesiz konnektörün koruyucu kapağı açılır ve içinde ilaç bulunan şırınganın enjektör adaptörü transfer setin iğnesiz konnektörüne kilitlenir.
7. Şırınga pistonu itilerek şırınga içindeki ilaç torba içine gönderilir. İlaç gönderimi tamamlandıktan sonra, şırınga içine az miktarda sıvı çekilir ve tekrar torbaya gönderilir.  
(YIKAMA)

### UYARILAR – ÖNLEMLER

1. Sağlık personeli tarafından kullanılmalıdır.
2. Ambalaj açılmışsa veya yırtıksa KULLANMAYINIZ.
3. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri KULLANMAYINIZ.
4. Kullanmadan önce tüm koruyucu kapakların olduğunu kontrol ediniz.
5. İğnesiz valflere, iğne ya da küt uçlu kanül ile giriş YAPMAYINIZ.
6. Kullanılan malzemelerin herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda KULLANMAYINIZ.
7. Valfin silikon parçası çoklu girişlerden sonra hasar görürse ya da orijinal formuna geri dönmezse, ürünü değiştiriniz. Bu sızıntıya neden olabilir
8. Bağlantıları aşırı SIKMAYINIZ.
9. Sızdırıyorsa, ürünü yenisiyle değiştiriniz.
10. Ürünün yapıştırma yerlerinden ayrılması durumunda ürünü yenisiyle değiştiriniz.
11. Ürün tek kullanımlıktır. YENİDEN STERİL ETMEYİNİZ.
12. Bir ilacın veya sıvının ürüne hasar verdiğini gözlemlerseniz, ürünü yenisiyle değiştiriniz ve ilacın adını vererek şirketimizi bilgilendiriniz.
13. İlaç hazırlama işlemi bittiğinde flakon adaptörünü flakondan ve enjektör adaptörünü şırıngadan ayırmadan bütün olarak imha ediniz.
14. Tehlikeli ilaçların imhasına yönelik yerel düzenlemeleri dikkate alınız.

## FLAKON ADAPTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

### DEPOLAMA SICAKLIĞI

Ürün depolama sıcaklığı 15 – 30°C 'dir.

### RAF ÖMRÜ

Ürün raf ömrü 5 yıldır.

### KULLANICILAR

Uzman hekimler, hemşireler, eczacılar ve diğer ilgili sağlık eğitimi almış çalışanlar.

### ETİKET AÇIKLAMALARI



İmalatçı  
Bilgileri



Onaylanmış  
Kuruluş  
Numarası



İmalat Tarihi



Son Kullanma  
Tarihi



Lot  
Numarası



Referans  
Numarası



EO Gazı ile  
Steril  
edilmiştir



Tekrar Steril  
Edilmez




Ambalajı  
Hasar  
Görmüşse  
Kullanmayınız



Güneşten  
Uzak  
Tutunuz



Kullanım  
Kılavuzuna  
Bakınız

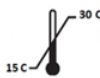

Saklama  
Sıcaklığı  
Limitleri



Tek  
Kullanımlıdır



Dikkat



Pirojen  
İçermez



DEHP  
İçermez



Lateks  
İçermez



Tıbbi Cihaz