

## IV İNFÜZYON SETİ KULLANIM KILAVUZU



### İLGİLİ ÜRÜNLER

İğnesiz/iğneli Y port içeren, UV korumalı ya da korumasız özellikte IV infüzyon setleri

### ÜRÜN TANIMI

IV ilaç uygulamalarının titizlikle yürütüldüğü tüm kliniklerde, hastalara güvenli bir şekilde intravenöz ilaç ve sıvı transferi amacıyla kullanılan setlerdir.

### KULLANMA TALİMATI

1. İnfüzyon setinin klempleri kapatılır.
2. Setin spike ucunun koruyucu kapağı açılır ve spike uç hastaya uygulanacak sıvı/ilaç veya benzeri solüsyonun portuna tek hamlede batırılır.
3. Klempler açılır ve damlama haznesinin yarıya kadar sıvı ile dolmasına ve sıvının set içinde ilerlemesine izin verilir.
4. Sıvının/ilacın bulunduğu kaba basınç uygulayarak setin içerisindeki hava çıkarılır. Tüm klempler kapatılır.
5. İnfüzyon setinin distal ucu hastanın damar yoluna bağlanır.
6. İnfüzyon seti üzerinde bulunan tüm klempler açılarak hastanın damar yolu kontrol edilir.
7. Roller klemp sayesinde sıvının akış hızı ayarlanabilir.
8. Sıvı/ilaç infüzyonu gerçekleştirilir.
9. Uygulama bitince infüzyon setinin klempleri kapatılır.
10. Uygulama devam ederken ya da bitince farklı ilaçlar uygulanacaksa, set üzerinde bulunan iğneli/iğnesiz Y port üzerinden ilgili ilaç infüzyon hattına enjekte edilir.
11. İşlemler tamamlanınca infüzyon setinin tüm klempleri kapatılır. Set bir bütün olarak imha edilir.
12. ÖNEMLİ NOT: İnfüzyon seti üzerinde bulunan "silikon hat", setin infüzyon pompası vasıtasıyla sıvı gönderim hassasiyetini optimum düzeye çıkarır. Serbest akışlı infüzyon setlerinde silikon hat bulunmaz.

### UYARILAR – ÖNLEMLER

1. Sağlık personeli tarafından kullanılmalıdır.
2. Hücre içeren kan ürünleri için uygun DEĞİLDİR.
3. Ambalaj açılmışsa veya yırtıkta KULLANMAYINIZ.
4. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri KULLANMAYINIZ.
5. Kullanmadan önce tüm koruyucu kapakların olduğunu kontrol ediniz.
6. İğnesiz valflere, iğne ya da küt uçlu kanül ile giriş YAPMAYINIZ.
7. Kullanılan malzemelerin herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda KULLANMAYINIZ.
8. Valf içeren ürünlerde, valfin silikon parçası çoklu girişlerden sonra hasar görürse ya da orijinal formuna geri dönmezse, seti değiştiriniz. Bu sızıntıya neden olabilir
9. Bağlantıları aşırı SIKMAYINIZ.
10. Sızdırıyorsa, ürünü yenisiyle değiştiriniz.
11. Setin yapıştırma yerlerinden ayrılması durumunda ürünü yenisiyle değiştiriniz.
12. Ürün tek kullanımlıktır. YENİDEN STERİL ETMEYİNİZ.
13. İnfüzyon setlerini gözetimsiz BIRAKMAYINIZ.
14. Bir ilacın veya sıvının infüzyon setine hasar verdiğini gözlemlerseniz, seti yenisiyle değiştiriniz ve ilacın adını vererek şirketimizi bilgilendiriniz.
15. İlaç uygulama işlemi bittiğinde infüzyon seti ve bağlı transfer setleri birbirinden ayırmadan bütün olarak imha ediniz.

## IV İNFÜZYON SETİ KULLANIM KILAVUZU

### DEPOLAMA SICAKLIĞI

Ürün depolama sıcaklığı 15 – 30°C 'dir.

### KULLANIM SÜRESİ

Ürün kullanım süresi 48 saattir.

### RAF ÖMRÜ

Ürün raf ömrü 5 yıldır.

### KULLANICILAR

Uzman hekimler, hemşireler, eczacılar ve diğer ilgili sağlık eğitimi almış çalışanlar.

### ETİKET AÇIKLAMALARI



İmalatçı  
Bilgileri



Onaylanmış  
Kuruluş  
Numarası



İmalat Tarihi



Son Kullanma  
Tarihi



Lot  
Numarası



Referans  
Numarası



EO Gazı ile  
Steril  
edilmiştir



Tekrar Steril  
Edilmez




Ambalajı  
Hasar  
Görmüşse  
Kullanmayınız



Güneşten  
Uzak  
Tutunuz



Kullanım  
Kılavuzuna  
Bakınız

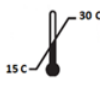

Saklama  
Sıcaklığı  
Limitleri



Tek  
Kullanımlıktır



Dikkat



Pirojen  
İçermez



DEHP  
İçermez



Lateks  
İçermez



Tıbbi Cihaz