

IV FİLTRE SETİ 0,2 mikron IV FİLTRE SETİ 1,2 mikron KULLANIM KILAVUZU



İLGİLİ ÜRÜNLER

0,2 ya da 1,2 mikronluk hat içi filtre içeren, UV korumalı ya da korumasız özellikte IV setler

ÜRÜN TANIMI

Total parenteral nütrisyon, onkolojik ilaç (Paklitaksel vb.) ya da diğer intravenöz ilaç uygulamaları için farklı uzunluklarda yapılandırılmış, ihtiyaca göre iğnesiz valf içerebilen, IV sıvıların uygun por boyutundan filtrelenerek damar yoluna infüzyonuna olanak sağlayan ve infüzyon setlerine eklenebilen filtreli setlerdir.

KULLANMA TALİMATI

1. Filtre setinin dışı luer ucunun koruyucu kapağını açınız. Filtre setinin klembini açarak, setin sıvı (serum fizyolojik) ile dolmasını sağlayınız ve havasını çıkarınız. Sıvı, filtre üzerinde bulunan ok yönünde akmalıdır. Filtreyi hava çıkarma esnasında dikey pozisyonda tutunuz, çevirmeyiniz. Hava çıkarma sonrası klembi kapatınız.
2. Filtre setinin erkek luer ucunun koruyucu kapağını açınız ve erkek ucu hastanın damar yolunda bulunan aparata kilitleyiniz.
3. Filtre setinin dışı luer ucunu/valfini şırıngaya ya da kullanım talimatına uygun olarak hazırlanan infüzyon setinin ucuna kilitleyiniz.
4. İnfüzyon seti ve filtre seti üzerinde bulunan tüm klemleri açarak hastanın damar yolunu kontrol ediniz. Onkolojik ilaç/IV sıvı/parenteral besin infüzyonunu gerçekleştiriniz.
5. Her sıvı gönderimi sonrası, hastane protokolünde belirtildiği şekilde seti ve kateteri yıkayınız.
6. İki dışı uca sahip ikili filtre setleri için, dışı luer uçlar farklı infüzyon setlerine bağlanabilir ya da dışı uçlardan biri infüzyon setine bağlanırken diğeri şırınga uygulamalarında kullanılabilir.
7. Uygulama bitince filtre setinin ve infüzyon setinin klemlerini kapatınız. Seti, atık yönetimine uygun şekilde imha ediniz.

8. Filtre seti, tüm luer kilitli şırıngalar ve setler için uygundur. Dönen erkek luer kilit bağlantısı kullanıldığında, luerin gövdede tutunurken halkanın üzerinde tutunmadığından emin olunuz. Luer slip şırıngalar kullanıldığında, şırıngayı valfe kilitlerken erkek luer slipi saat yönünde 90-180° döndürünüz. İşlem bitince luer slipi saatin ters yönünde döndürerek valften ayırınız.
9. Valf içeren filtre setlerinin iğnesiz konnektörü, giriş yeri dezenfeksiyon prosedürleri tam olarak uygulanıyorsa 7 gün boyunca mikrobiyolojik bariyer sağlar. (Bknz. Flyer TR 2021 Mikrobiyolojik Bariyer)

UYARILAR – ÖNLEMLER

1. Sağlık personeli tarafından kullanılmalıdır.
2. Hücre içeren kan ürünleri için uygun DEĞİLDİR.
3. Ambalaj açılmışsa veya yırtıksa KULLANMAYINIZ.
4. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri KULLANMAYINIZ.
5. Kullanmadan önce tüm koruyucu kapakların olduğunu kontrol ediniz.
6. İğnesiz valflere, iğne ya da küt uçlu kanül ile giriş YAPMAYINIZ.
7. Kullanılan malzemelerin herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda KULLANMAYINIZ.
8. Valf içeren ürünlerde, valfin silikon parçası çoklu girişlerden sonra hasar görürse ya da orijinal formuna geri dönmezse, seti değiştiriniz. Bu sızıntıya neden olabilir.
9. Bağlantıları aşırı SIKMAYINIZ.
10. Sızdırıyorsa, ürünü yenisiyle değiştiriniz.
11. Setin yapıştırma yerlerinden ayrılması durumunda ürünü yenisiyle değiştiriniz.
12. Ürün tek kullanımlıktır. YENİDEN STERİL ETMEYİNİZ.
13. Filtre setini ve infüzyon setlerini gözetimsiz BIRAKMAYINIZ.
14. Bir ilacın veya sıvının sete hasar verdiğini gözlemlerseniz, seti yenisiyle değiştiriniz ve ilacın adını vererek şirketimizi bilgilendiriniz.

IV FİLTRE SETİ 0,2 mikron IV FİLTRE SETİ 1,2 mikron KULLANIM KILAVUZU

DEPOLAMA SICAKLIĞI

Ürün depolama sıcaklığı 15 – 30°C 'dir.

KULLANIM SÜRESİ

Valf içeren filtre setlerinin "iğnesiz konnektörü", giriş yeri dezenfeksiyon prosedürleri tam olarak uygulanıyorsa 7 gün boyunca mikrobiyolojik bariyer sağlar.

RAF ÖMRÜ

Ürün raf ömrü 5 yıldır.

KULLANICILAR

Uzman hekimler, hemşireler, eczacılar ve diğer ilgili sağlık eğitimi almış çalışanlar.

ETİKET AÇIKLAMALARI



İmalatçı
Bilgileri



Onaylanmış
Kuruluş
Numarası



İmalat Tarihi



Son Kullanma
Tarihi



Lot
Numarası



Referans
Numarası



EO Gazı ile
Steril
edilmiştir



Tekrar Steril
Edilmez




Ambalajı
Hasar
Görmüşse
Kullanmayınız



Güneşten
Uzak
Tutunuz



Kullanım
Kılavuzuna
Bakınız

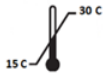

Saklama
Sıcaklığı
Limitleri



Tek
Kullanımlıktır



Dikkat



Pirojen
İçermez



DEHP
İçermez



Lateks
İçermez



Tıbbi Cihaz