

İĞNESİZ VEN VALFİ İĞNESİZ KONNEKTÖR KULLANIM KILAVUZU



İLGİLİ ÜRÜNLER

Hastanın damar yoluna sıvı/ilaç vermek için kullanılan iğnesiz ven valfleri

ÜRÜN TANIMI

Hasta ve sağlık çalışanlarını sıvılara ve iğne batmalarına maruz kalmaktan koruyan, bütünlük düz bir silikon conta ile kısmen şeffaf berrak muhafazadan oluşan, tüm luer kilitli konnektörlere uyumlu iğnesiz ven valfleridir.

KULLANMA TALİMATI

- İğnesiz ven valfinin dişi luer ucundaki koruyucu kapağı çıkarınız.
- Herhangi bir şırıngayı veya IV seti bağlamadan önce dişi luer uçta bulunan silikon kısmı, hastanenin enfeksiyon kontrol prosedürüne uygun şekilde klorheksidin/alkol/IPA vb. içeren mendil ile dezenfekte ediniz.
- İğnesiz valfin içinden sıvı (serum fizyolojik) geçirerek kullanıma hazır hale getiriniz.
- İğnesiz valfin erkek luer ucunun koruyucu kapağını açınız ve erkek ucu hastanın damar yolunda bulunan aparata kilitleyiniz.
- İğnesiz ven valfinin dişi luer ucunu şırıngaya ya da kullanım talimatına uygun olarak hazırlanan infüzyon setinin ucuna kilitleyiniz.
- İnfüzyon setinin klembini açarak ya da şırınga pistonunu iterek "serum fizyolojik" yardımı ile hastanın damar yolunu kontrol ediniz. Ardından ilaç/sıvı/kan/parenteral besin infüzyonunu gerçekleştiriniz.
- İğnesiz Ven Valfi, tüm luer kilitli şırıngalar ve setler için uygundur. Döner bir halka içeren erkek luer kilit bağlantısı kullanıldığında, halkayı sabitlemeden önce luer konnektörün tam olarak bağlandığından emin olunuz. Luer slip şırıngalar kullanıldığında, şırıngayı valfe kilitlerken erkek luer slipi saat yönünde döndürünüz. İşlem bitince luer slipi saatin ters yönünde döndürerek valften ayırınız.

- Her sıvı gönderimi sonrası, hastane protokolünde belirtildiği şekilde valfi ve kateteri yıkayınız.
- Tüm işlemler tamamlandığında, valfi hastanenin atık yönetimi prosedürüne uygun şekilde imha ediniz.
- İğnesiz ven valfi, giriş yeri dezenfeksiyon prosedürleri tam olarak uygulanıyorsa 7 gün boyunca mikrobiyolojik bariyer sağlar. (Bknz. Flyer TR 2021 Mikrobiyolojik Bariyer)

UYARILAR – ÖNLEMLER

- Sağlık personeli tarafından kullanılmalıdır.
- Ambalaj açılmışsa veya yırtıkta KULLANMAYINIZ.
- Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri KULLANMAYINIZ.
- Kullanmadan önce tüm koruyucu kapakların olduğunu kontrol ediniz.
- İğnesiz valflere, iğne ya da küt uçlu kanül ile giriş YAPMAYINIZ.
- Kullanılan malzemelerin herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda KULLANMAYINIZ.
- Valfin silikon parçası çoklu girişlerden sonra hasar görürse ya da orijinal formuna geri dönmezse, seti değiştiriniz. Bu sızıntıya neden olabilir.
- Bağlantıları aşırı SIKMAYINIZ.
- Sızdırıyorsa, ürünü yenisiyle değiştiriniz.
- Ürünün yapıştırma yerlerinden ayrılması durumunda ürünü yenisiyle değiştiriniz.
- Ürün tek kullanımlıktır. YENİDEN STERİL ETMEYİNİZ.
- İnfüzyon setlerini gözetimsiz BIRAKMAYINIZ.
- Bir ilacın veya sıvının ürüne hasar verdiğini gözlemlerseniz, ürünü yenisiyle değiştiriniz ve ilacın adını vererek şirketimizi bilgilendiriniz.

İĞNESİZ VEN VALFİ İĞNESİZ KONNEKTÖR KULLANIM KILAVUZU

DEPOLAMA SICAKLIĞI

Ürün depolama sıcaklığı 15 – 30°C 'dir.

KULLANIM SÜRESİ

İğnesiz ven valfi, giriş yeri dezenfeksiyon prosedürleri tam olarak uygulanıyorsa 7 gün boyunca mikrobiyolojik bariyer sağlar.

RAF ÖMRÜ

Ürün raf ömrü 5 yıldır.

KULLANICILAR

Uzman hekimler, hemşireler, eczacılar ve diğer ilgili sağlık eğitimi almış çalışanlar.

ETİKET AÇIKLAMALARI



İmalatçı
Bilgileri



Onaylanmış
Kuruluş
Numarası



İmalat Tarihi



Son Kullanma
Tarihi



Lot
Numarası



Referans
Numarası



EO Gazı ile
Steril
edilmiştir



Tekrar Steril
Edilmez



Ambalajı
Hasar
Görmüşse
Kullanmayınız



Güneşten
Uzak
Tutunuz



Kullanım
Kılavuzuna
Bakınız



Saklama
Sıcaklığı
Limitleri



Tek
Kullanımlıktır



Dikkat



Pirojen
İçermez



DEHP
İçermez



Lateks
İçermez



Tıbbi Cihaz