

İĞNESİZ VEN VALF SETİ İĞNESİZ KONNEKTÖR SETİ KULLANIM KILAVUZU



İLGİLİ ÜRÜNLER

Hastanın damar yoluna sıvı/ilâç vermek için kullanılan tekli, ikili ya da üçlü iğnesiz ven valf setleri

ÜRÜN TANIMI

Hasta ve sağlık çalışanlarını sıvılara ve iğne batmalarına maruz kalmaktan koruyan, hastanın damar yoluna ilâç/sıvı uygulanması amacıyla kullanılan, bütünleşik düz bir silikon conta, dahili sıvı yolu ile kısmen şeffaf berrak muhafazadan oluşan, UV korumalı ya da korumasız özellikte, tekli-ikili-üçlü iğnesiz ven valfi setleridir.

KULLANMA TALİMATI

- 1) İğnesiz ven valf setinin dışı luer ucundaki (ya da uçlarındaki) koruyucu kapağı çıkarınız.
- 2) Herhangi bir şırıngayı veya IV seti bağlamadan önce dışı luer uçta (ya da uçlarda) bulunan silikon kısmı, hastanenin enfeksiyon kontrol prosedürüne uygun şekilde klorheksidin/alkol/IPA vb. içeren mendil ile dezenfekte ediniz.
- 3) İğnesiz ven valf setinin klembini açınız, içinden sıvı (serum fizyolojik) geçirerek kullanıma hazır hale getiriniz ve havasını çıkarınız. Klembi tekrar kapatınız.
- 4) Setin erkek luer ucunun koruyucu kapağını açınız ve erkek ucu hastanın damar yolunda bulunan aparata kilitleyiniz.
- 5) İğnesiz ven valf setinin dışı luer ucunu (ya da uçlarını) şırıngaya ya da kullanım talimatına uygun olarak hazırlanan infüzyon setinin ucuna kilitleyiniz.
- 6) İğnesiz ven valf seti ve infüzyon setinin klembini açarak ya da şırınga pistonunu iterek "serum fizyolojik" yardımı ile hastanın damar yolunu kontrol ediniz. Ardından ilâç/sıvı/kan/parenteral besin infüzyonunu gerçekleştiriniz. İşlem bitince klemleri kapatınız.

- 7) İki ya da üç ven valfine sahip çoklu setler için, iğnesiz ven valfleri farklı infüzyon setlerine bağlanabilir ya da ven valflerinden biri infüzyon setine bağlanırken diğerleri şırınga uygulamalarında kullanılabilir.
- 8) İğnesiz ven valf seti, tüm luer kilitli şırıngalar ve setler için uygundur. Döner bir halka içeren erkek luer kilit bağlantısı kullanıldığında, halkayı sabitlemeden önce luer konnektörün tam olarak bağlandığından emin olunuz. Luer slip şırıngalar kullanıldığında, şırıngayı valfe kilitleyirken erkek luer slipi saat yönünde döndürünüz. İşlem bitince luer slipi saatin ters yönünde döndürerek valften ayırınız.
- 9) Her sıvı gönderimi sonrası, hastane protokolünde belirtildiği şekilde ven valf setini ve kateteri yıkayınız.
- 10) Tüm işlemler tamamlandığında, ven valf setini hastanenin atık yönetimi prosedürüne uygun şekilde imha ediniz.
- 11) Setin üzerinde bulunan iğnesiz ven valfleri, giriş yeri dezenfeksiyon prosedürleri tam olarak uygulanıyorsa 7 gün boyunca mikrobiyolojik bariyer sağlar. (Bknz. Flyer TR 2021 Mikrobiyolojik Bariyer)
- 12) Ürünün, hasta damar yolundaki aparatın dışı luer ucuna bağlanan erkek ucu vidasızdır. Bu nedenle hasta üzerinde denetimsiz bırakmayınız. Ürün, hasta damar yolu aparatının dışı luer ucundan ayrılabilir ve hasta kanamasına neden olabilir.
- 13) Tek yönlü valf içeren ürünlerde (Check valf);
 - Ürünün lümenleri tek yönlüdür. Bu lümenlerden kan almaya çalışmayınız, sadece hastaya sıvı-ilâç uygulama yapınız.
 - Şırınga veya infüzyon seti valften ayrılırken, valfin içine luer hacmi kadar (0,1 mL) hava girmesi olasıdır. Bu hava miktarının (0,1 mL) hastanın venöz sistemine girişinin sakıncalı olduğu durumlarda (ASD – VSD), tek yönlü valf içeren setleri kullanmayınız.

İĞNESİZ VEN VALF SETİ İĞNESİZ KONNEKTÖR SETİ KULLANIM KILAVUZU

- Sıvı akışı yeterli değilse, serum torbasına takılan spike ucun uygun açıklığa sahip olduğundan ya da serum şişesi kullanılıyorsa setin havalandırmasının yeterli olduğundan emin olunuz.

UYARILAR – ÖNLEMLER

1. Sağlık personeli tarafından kullanılmalıdır.
2. Ambalaj açılmışsa veya yırtıksa KULLANMAYINIZ.
3. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri KULLANMAYINIZ.
4. Kullanmadan önce tüm koruyucu kapakların olduğunu kontrol ediniz.
5. İğnesiz valflere, iğne ya da küt uçlu kanül ile giriş YAPMAYINIZ.
6. Kullanılan malzemelerin herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda KULLANMAYINIZ.
7. Valfin silikon parçası çoklu girişlerden sonra hasar görürse ya da orijinal formuna geri dönmezse, seti değiştiriniz. Bu sızıntıya neden olabilir.
8. Bağlantıları aşırı SIKMAYINIZ.
9. Sızdıyorsa, ürünü yenisiyle değiştiriniz.
10. Setin yapıştırma yerlerinden ayrılması durumunda ürünü yenisiyle değiştiriniz.
11. Set tek kullanımlıktır. YENİDEN STERİL ETMEYİNİZ.
12. İnfüzyon setlerini gözetimsiz BIRAKMAYINIZ.
13. Bir ilacın veya sıvının sete hasar verdiğini gözlemlerseniz, seti yenisiyle değiştiriniz ve ilacın adını vererek şirketimizi bilgilendiriniz.

DEPOLAMA SICAKLIĞI

Ürün depolama sıcaklığı 15 – 30°C 'dir.

KULLANIM SÜRESİ

Setin üzerinde bulunan iğnesiz ven valfleri, giriş yeri dezenfeksiyon prosedürleri tam olarak uygulanıyorsa 7 gün boyunca mikrobiyolojik bariyer sağlar.

RAF ÖMRÜ

Ürün raf ömrü 5 yıldır.

KULLANICILAR

Uzman hekimler, hemşireler, eczacılar ve diğer ilgili sağlık eğitimi almış çalışanlar.

ETİKET AÇIKLAMALARI



İmalatçı
Bilgileri



Onaylanmış
Kuruluş
Numarası



İmalat Tarihi



Son Kullanma
Tarihi



Lot
Numarası



Referans
Numarası



EO Gazı ile
Steril
edilmiştir



Tekrar Steril
Edilmez



Ambalajı
Hasar
Görmüşse
Kullanmayınız



Güneşten
Uzak
Tutunuz



Kullanım
Kılavuzuna
Bakınız



Saklama
Sıcaklığı
Limitleri



Tek
Kullanımlıktır



Dikkat



Pirojen
İçermez



DEHP
İçermez



Lateks
İçermez



Tıbbi Cihaz