

## TORBA ADAPTÖRÜ TORBA VALFİ KULLANIM KILAVUZU



### İLGİLİ ÜRÜNLER

Serum torbasından sıvı boşaltmak ve/veya torbaya sıvı vermek amacıyla kullanılan spike uç, iğnesiz konnektör ve gerekli durumlarda check valf içeren torba adaptörleri

### ÜRÜN TANIMI

Hasta ve sağlık çalışanlarını sıvılara ve iğne batmalarına maruz kalmaktan koruyan, serum torbasından sıvı boşaltmak ve/veya torbaya sıvı göndermek amacıyla kullanılan spike içeren sıvı transfer ürünleridir.

### KULLANMA TALİMATI

- 1) Ürünün steril ambalajını spike içeren tarafından açınız. (İki spike uç içeren ürün için steril ambalajı tek tarafından açınız). Steril ambalajın spike içermeyen tarafını ambalajın üzerinden tutunuz, ürünü tamamen ambalajından çıkarmayınız.
- 2) Spike ucun koruyucu kapağını çıkarınız. Spike uca hiçbir zaman dokunmayınız. Bu kontaminasyon ile sonuçlanacaktır. Spike ucu torba portuna iterek sıkıca yerleştiriniz. Torbayı askıya asınız. Ürünün steril ambalajını, ürüne temas etmeden çekip atınız.
- 3) Valf içeren ucun koruyucu kapağını çıkarınız. Valfin luer girişine dokunmayınız. Bu kontaminasyon ile sonuçlanacaktır. Sıvı transferi amacıyla kullanılacak luer kilitli şırınganın ucunu valfe dik bir şekilde tutarak ve saat yönünde döndürerek valfe kilitleyiniz. Şırıngayı her zaman valfe dik tutunuz, eğimli giriş yapmayınız. Cam şırınga kullanılacaksa, şırıngayı gövdesinden tutmayınız.
- 4) Sıvıyı torbadan şırıngaya çekiniz ya da torbaya enjekte ediniz. (Tek yönlü check valf içeren ürünlerde sadece torbadan sıvı çekme işlemi yapılabilir).
- 5) İşlem tamamlanınca şırıngayı saatin ters yönünde çevirerek valften ayırınız.

- 6) Farklı bir şırıngayı veya IV seti bağlamadan önce valfin luer ucunu hastanenin enfeksiyon kontrol prosedürüne uygun şekilde klorheksidin/alkol/IPA vb. içeren mendil ile dezenfekte ediniz.
- 7) Tüm işlemler tamamlandığında, ürünü, torbayı ve şırıngayı hastanenin atık yönetimi prosedürüne uygun şekilde imha ediniz.
- 8) Ürün üzerindeki iğnesiz valf, tüm luer kilitli şırıngalar ve setler için uygundur. Döner bir halka içeren erkek luer kilit bağlantısı kullanıldığında, halkayı sabitlemeden önce luer konnektörün tam olarak bağlandığından emin olunuz. Luer slip şırıngalar kullanıldığında, şırıngayı valfe kilitletken erkek luer slipi saat yönünde döndürünüz. İşlem bitince luer slipi saatin ters yönünde döndürerek valften ayırınız.
- 9) Ürünün üzerinde bulunan iğnesiz ven valfleri, giriş yeri dezenfeksiyon prosedürleri tam olarak uygulanıyorsa, çoklu kullanımlarda 7 gün boyunca mikrobiyolojik bariyer sağlar. (Bknz. Flyer TR 2021 Mikrobiyolojik Bariyer)
- 10) Tek yönlü valf içeren ürünlerde (Check valf);
  - Ürünün lümenleri tek yönlüdür. Bu lümenlerden torbaya sıvı göndermeye çalışmayınız, sadece torbadan sıvı çekiniz.
- 11) Çift spike içeren ürünlerde;
  - Şırınga kullanmayınız. Her iki spike ucu da ilgili torbalara yerleştirip torbadan torbaya sıvı aktarımını torba gövdesini sıkmak suretiyle gerçekleştiriniz.

# TORBA ADAPTÖRÜ TORBA VALFİ KULLANIM KILAVUZU

## UYARILAR – ÖNLEMLER

1. Sağlık personeli tarafından kullanılmalıdır.
2. Ambalaj açılmışsa veya yırtıksa KULLANMAYINIZ.
3. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri KULLANMAYINIZ.
4. Kullanmadan önce tüm koruyucu kapakların olduğunu kontrol ediniz.
5. İğnesiz valflere, iğne ya da küt uçlu kanül ile giriş YAPMAYINIZ.
6. Kullanılan malzemelerin herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda KULLANMAYINIZ.
7. Valfin silikon parçası çoklu girişlerden sonra hasar görürse ya da orijinal formuna geri dönmezse, ürünü değiştiriniz. Bu sızıntıya neden olabilir.
8. Bağlantıları aşırı SIKMAYINIZ.
9. Sızdırıyorsa, ürünü yenisiyle değiştiriniz.
10. Ürünün yapıştırma yerlerinden ayrılması durumunda ürünü yenisiyle değiştiriniz.
11. Ürün tek kullanımlıktır. YENİDEN STERİL ETMEYİNİZ.
12. İnfüzyon setlerini gözetimsiz BIRAKMAYINIZ.
13. Bir ilacın veya sıvının ürüne hasar verdiğini gözlemlerseniz, ürünü yenisiyle değiştiriniz ve ilacın adını vererek şirketimizi bilgilendiriniz.

## DEPOLAMA SICAKLIĞI

Ürün depolama sıcaklığı 15 – 30°C 'dir.

## KULLANIM SÜRESİ

Ürünün üzerinde bulunan iğnesiz ven valfleri, giriş yeri dezenfeksiyon prosedürleri tam olarak uygulanıyorsa, çoklu kullanımlarda 7 gün boyunca mikrobiyolojik bariyer sağlar.

## RAF ÖMRÜ

Ürün raf ömrü 5 yıldır.

## KULLANICILAR

Uzman hekimler, hemşireler, eczacılar ve diğer ilgili sağlık eğitimi almış çalışanlar.

## ETİKET AÇIKLAMALARI



İmalatçı  
Bilgileri



Onaylanmış  
Kuruluş  
Numarası



İmalat Tarihi



Son Kullanma  
Tarihi



Lot  
Numarası



Referans  
Numarası



EO Gazı ile  
Steril  
edilmiştir



Tekrar Steril  
Edilmez



Ambalajı  
Hasar  
Görmüşse  
Kullanmayınız



Güneşten  
Uzak  
Tutunuz



Kullanım  
Kılavuzuna  
Bakınız



Saklama  
Sıcaklığı  
Limitleri



Tek  
Kullanımlıktır



Dikkat



Pirojen  
İçermez



DEHP  
İçermez



Lateks  
İçermez



Tıbbi Cihaz